

DERMACIT

gel

DERMACIT GEL è un gel studiato per proteggere e prevenire l'insorgenza di infezioni mediante un effetto barriera che crea le condizioni per una più rapida cicatrizzazione delle lesioni cutanee. DERMACIT GEL è composto da sostanze naturalmente presenti nell'organismo (acido ialuronico e sodio ialuronato) capaci di creare un microambiente sfavorevole alla contaminazione dei microrganismi che aiuta il processo di cicatrizzazione.

INDICAZIONI

È in particolare indicato nei casi di: ferite superficiali traumatiche come tagli, abrasioni, ragadi cutanee (mani, piedi) e trattamento delle cicatrici postchirurgiche.

MODALITÀ D'USO

Lavare bene le mani prima dell'uso. Pulire bene la cute con soluzione detergente idonea come Dermacit Spray Ferite o con soluzione fisiologica sterile prima dell'applicazione del prodotto. Stendere sulla parte interessata una piccola quantità di prodotto in modo uniforme. Dermacit gel può essere utilizzato da solo o con medicazioni secondarie idonee, tipo garze, bende, cerotti, medicazioni non aderenti, per il suo mantenimento in situ. In caso fosse necessario, ripetere l'applicazione più volte al di. Utilizzabile anche per applicazioni ripetute oltre ai 30 giorni.

Nel caso in cui il dispositivo venga applicato al paziente da terzi, è indicato che questi usino guanti monouso.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico Idrolizzato, Sodio Ialuronato, Perossido di Idrogeno, Polimeri Gelificanti, Agenti Stabilizzanti, Acqua Depurata.

AVVERTENZE

DERMACIT GEL è di solito ben tollerato. È possibile però avvertire per un breve periodo, dopo l'applicazione del prodotto, un leggero arrossamento accompagnato da un lieve bruciore. In presenza di ferite purulente è indicato consultare il medico in quanto può essere necessario associare terapie antibiotiche locali o sistematiche. Comunicare al medico o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga in contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'uso richiudere accuratamente il tappo. Non utilizzare se il tubetto risulta danneggiato. Nel caso in cui il dispositivo venga applicato da terzi, è indicato che questi utilizzino guanti monouso. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul tubetto.

