

spray
ferite

DERMACIT

deterge e favorisce
la cicatrizzazione

Dermacit spray deterge e protegge la cute aiutando a prevenire il contatto con microrganismi esogeni e previene l'insorgenza di possibili infezioni mediante un effetto barriera che crea le condizioni per agevolare il ripristino della fisiologica barriera cutanea e favorire il processo di riepitelizzazione.

Dermacit spray è composto da sostanze naturalmente presenti nell'organismo (acido ialuronico e sodio ialuronato) capaci di creare un microambiente sfavorevole alla contaminazione microbica. E' anche indicato come coadiuvante nel trattamento delle piccole cicatrici postchirurgiche e per la detersione della zona perilesionale.

INDICAZIONI D'USO

È in particolare indicato nella detersione della cute di soggetti con pelle predisposta a sviluppare abrasioni superficiali e ragadi cutanee (mani e piedi) causati dalla fragilità della cute. È anche indicato come coadiuvante nel trattamento delle piccole cicatrici postchirurgiche.

MODALITÀ D'USO

Spruzzare sulla parte interessata una quantità idonea di prodotto in modo uniforme, eventualmente tamponando l'eccesso con una garza, fino ad ottenere una pulizia ottimale dell'area interessata. Lasciare asciugare. Dermacit Spray può essere utilizzato da solo o può essere indicato applicare anche una piccola quantità di Dermacit Gel. In caso fosse necessario, ripetere l'applicazione più volte al dì.

INGREDIENTI

aqua, hydrogen peroxide, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, hydrolyzed hyaluronic acid, sorbitan isostearate, polysorbate 60, sodium hyaluronate, sodium hydroxide.

AVVERTENZE

Dermacit spray è di solito ben tollerato. Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso in cui il prodotto venga in contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con abbondante acqua fredda. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'uso richiudere accuratamente il tappo. Conservare a temperatura ambiente e in luogo asciutto. Non applicare su cute lesa.

ATTENZIONE

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.